



1. Allumer / éteindre la pompe
2. Réglage débit
3. Couper / quitter l'alarme
4. Démarrer / arrêter la pompe (avec débit souhaité)

Utilisation :

1. Emplacement de la tubulure dans l'appareil + remplissage du stilligoutte
2. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt (l'appareil effectuera un test automatique)
3. Régler le dosage prescrit
4. Appuyer sur la touche Start/Stop : début et fin de la perfusion
5. Pour changer le débit en cours d'utilisation, repasser au point 4

Rappel :

1. Utiliser uniquement les tubulures CODEM-
2. Utiliser uniquement les feutres BIOREN car ils sont compatibles (feutres n'altèrent pas la solution de perfusion)
3. Si le témoin DEF AUT est allumé, changer immédiatement la pompe.
4. Le stilligoutte doit toujours être en position verticale pour que les gouttes puissent être comptées correctement
5. Etre extrêmement vigilant avec la pompe lorsque celle-ci est utilisée pour des AMINES ! En cas d'alarme, c'est une urgence que de trouver la cause du problème !