

Etape 1

Installation du patient

- La tête de pression sera scotchée sur le thorax du patient, ceci pour éviter toute variation du chiffre de la TA due à une variation de hauteur de la tête de pression
- Vérifier le cathéter : Position, fixation, aspect du pansement
- Vérifier la pression de la manchette (+/-300mb ou cmH2o)
- Vérifier le "flush" (→ perméabilité du cathéter) en tirant la languette présente sur la tête de pression



Etape 2

Branchement sur le Zoll

- Choisir le câble approprié au système de Cat. Art
Ici système de Pourtalès
- Connecter la prise ronde au Zoll → coté droit → Pression invasive → P1
- Connecter l'autre bout au système de Cat. Art. en place
- Le moniteur affiche une zone en rouge. C'est la courbe d'artère.

Suite sur 2^{ème} carte : Mise à zéro

