

Explications :

1. Volume courant
2. Fréquence de ventilation
3. Pression de crête (Réglage uniquement par le médecin)
4. Concentration en O₂ (40% à 100%)
5. Bouton central tournant pour la sélection, le réglage et la validation
6. Touche Marche/Arrêt

Alarme possible :

- Si (!!) Recharger la batterie, la durée de fonctionnement restante n'est plus que de quelques minutes (durée typique, 10 min).

Caractéristiques :

- Durée de fonctionnement sans alimentation secteur avec ventilation standard : maximum 4 heures
- Aptitude pédiatrique
- **Alimentation électrique à partir d'une source de courant continu dans un véhicule par exemple, support fourni (prise allume - cigare) : 10 – 32 V DC**
- **Alimentation électrique à partir du secteur : 220 V AC**